



ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНФУЗИОННИ КОМПЛЕКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Продуктът се подава само чрез гравитация и се използва за инфузия.

Основна структура и свойства

- Тръбите и капковата камера са прозрачни, могат лесно да се наблюдават;
- Тръбите са достатъчно гъвкави, за да са устойчиви на навиване и усукване;
- Дизайнът на устройството за затваряне и пробиване го прави удобно за работа и използване;
- Регулаторът на дебита може да променя дебита от минимален до максимален.

ИЗПОЛЗВАНЕ

- Първо, преди да използвате, проверете срока на валидност и цялостта на опаковката;
- Разкъсайте опаковката в разрезната част и извадете комплекта за инфузия;
- Затворете регулатора, издърпайте защитната капачка на устройството за затваряне и пробиване и пъхнете шипа в дезинфекционната капачка на контейнера за течности;
- Поставете контейнера за течности с главата надолу, натиснете камерата и половината от нея се напълни с инжекционен разтвор; след това отворете регулатора, за да отстраните въздуха в тръбата.
- Проникнете във вената съгласно асептичната манипулация след отстраняване на въздуха, след което я фиксирайте.
- Наблюдавайте и след това променете скоростта на потока на нормална.
- Операцията по инфузията трябва да се извършва от професионални медицински сестри, които да я изпълняват и пазят.
- 20 капки=(1±0,1) ml [(1±0,1) g]

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Може да предизвика хипотермия - особено при слаби пациенти;
- Може да причини анормален титем на сърдечните вентрики поради бързата скорост на потока;
- По време на инфузията трябва да се осигури наблюдение в случай на злополука.
- Преди отваряне на опаковката тя трябва да бъде стерилна и без пирогени;
- Валидността му е пет години, не го използвайте, ако е след изтичане на срока на валидност.
- Изхвърлете след еднократна употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не използвайте, ако опаковката е отворена или повредена, или защитната капачка е разкъсана, някоя част е пропусната и са открити чужди тела;
- Трябва да се използва от специално обучено лице, а кожата трябва да бъде правилно стерилизирана.
- Продуктите не могат да се използват повторно. Повторната употреба може да доведе до кръстосана инфекция, дори до сериозни заболявания като хепатит, ХИВ и други инфекциозни заболявания.
- Винаги изхвърляйте замърсените с кръвта продукти по начин, съответстващ на установените процедури за биологична опасност.

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът трябва да се съхранява в състояние, при което относителната влажност е по-малка от 80%, също така не трябва да съдържа корозивни газове, да е хладен, сух, с добра вентилация и чист.

Всеки сериозен инцидент, настъпил във връзка с изделието, следва да бъде докладван на производителя и компетентния орган на държавата членка, в която е установен потребителят и/или

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВТОРНО	НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ, АКО ОПАКОВКАТА Е ПОВРЕДЕНА	STERILE СТЕРИЛНО	STERILE EO СТЕРИЛИЗИРАНО С ПОМОЩТА НА ЕТИЛЕНОВ ОКСИД
MD МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ	UDI УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР НА ИЗДЕЛИЕТО	ВНИМАНИЕ	СЪДЪРЖАНИЕ или НАЛИЧИЕ на ФТАЛАТИ
Единична стерилна бариерна система	Единична стерилна бариерна система със защитна външна опаковка	ВЕР.:V/0 ВЛИЗА В СИЛА: 2023-07-10	