



# INSTRUCTIONS POUR LES SERINGUES JETABLES

## INDICATIONS D'UTILISATION

Les seringues jetables sont spécialement conçues comme outil pour l'injection veineuse et hypodermique de solution dans le corps humain. Les seringues jetables doivent être utilisées avec l'aiguille.

### Structure et propriétés principales

- Ce produit est composé d'un barillet, d'un piston et d'un plongeur.
- Le cylindre doit être propre et suffisamment transparent pour être facilement observé.
- Le baril et le piston s'accordent bien et ont une bonne propriété de glissement, ce qui les rend faciles à utiliser.
- Le piston est facile à manipuler et à utiliser.

## SPÉCIFICATION

- Seringues à trois parties de 1 ml à 60ml;
- Seringues en deux parties, de 2 ml à 20 ml.

## UTILISATION

- Tout d'abord, vérifiez la période de validité et l'intégralité de l'emballage avant de l'utiliser;
- Déchirez l'emballage au niveau de la partie coupée et sortez la seringue sans aiguille ;
- Poussez et tirez le piston jusqu'à ce qu'il soit bien lubrifié;
- Connectez la seringue avec l'aiguille, vérifiez que l'aiguille est bien connectée à la seringue;
- Retirez le capuchon de protection de l'aiguille, puis procédez à la manipulation stérile requise.

## Avertissements et précautions

- Expulsez tout l'air contenu dans le cylindre de l'aiguille vers le haut, au cas où un dégagement gazeux se produirait si de l'air était injecté dans les vaisseaux sanguins du corps humain ou une tumeur si du gaz était injecté dans le tissu sous-cutané;
- Il doit être stérile et exempt de pyrogènes avant l'ouverture de l'emballage;
- Il a une période de validité de cinq ans, ne pas utiliser s'il est au-delà de la date de validité;
- Jeter après une seule utilisation;
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé, si le capuchon de protection est détaché ou si des corps étrangers sont présents;
- Il doit être utilisé par une personne spécialement formée, et la peau doit être correctement stérilisée;
- Les produits ne peuvent pas être réutilisés. L'utilisation répétée peut provoquer une infection croisée, voire des maladies graves comme l'hépatite, le VIH et d'autres maladies infectieuses.

## STOCKAGE

Le produit doit être conservé dans des conditions où l'humidité relative est inférieure à 80%, il doit également être exempt de gaz corrosifs, frais, sec, bien ventilé et propre.

NE PAS RÉUTILISER	NE PAS UTILISER SI L'EMBALLAGE EST ENDOMMAGÉ	<b>STERILE</b> STÉRILISER	<b>STERILE EO</b> STÉRILISÉ À L'OXYDE D'ÉTHYLÈNE
<b>MD</b> DISPOSITIF MÉDICAL	<b>UDI</b> IDENTIFIANT UNIQUE DU DISPOSITIF	ATTENTION	<b>CE</b> 2862
Système de barrière stérile unique	Système de barrière stérile simple avec emballage protecteur extérieur		REV.: A/0 EN VIGUEUR: 24-01-2022